

Bruksanvisning RUBY 7 HD® Handkamera



insyn







RUBY 7 HD är ett portabelt elektroniskt förstoringsglas med 7" skärm.

RUBY 7 HD har följande funktioner:

- HD kamera med autofocus.
- Förstoring 2X till 24X
- Högkontrastlägen 20 Färgkombinationer.
- Frysfunction av bild.
- Panorering i fryst eller sparad bild.
- Justerbara referens och kulisser.
- Upp till 105 bilder kan sparas i RUBY, kan flyttas till PC via USB.
- Utfällbart stativ.

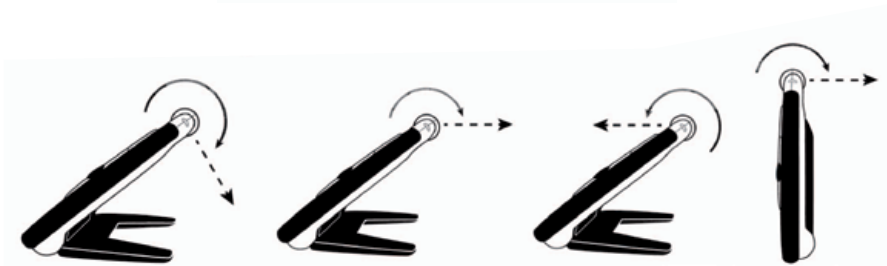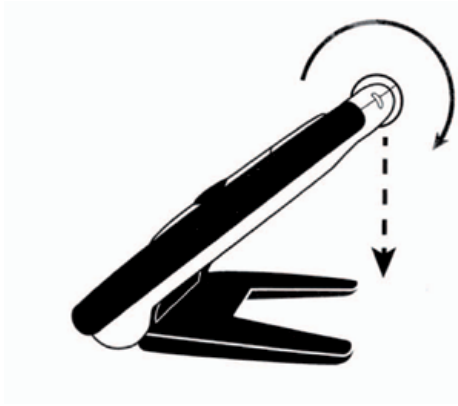

Säkerhet och underhåll

Läs noga dessa instruktioner innan du installerar utrustningen.


- Läs manualen innan du börjar använda RUBY 7HD.
- Kontakta din återförsäljare vid behov av service. Försök inte själv reparera eller öppna höljet på RUBY 7 HD, då upphör garantin.
- Placera RUBY inomhus undvik våta utrymmen och hög luftfuktighet.
- Använd RUBY 7 HD i lokaler med temperatur mellan 10° och 35°.
- Använd alltid medföljande nätadapter för att ladda batterierna.
- Stäng av och drag alltid ut sladden innan du rengör RUBY 7 HD. Använd mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel eller sprit.

Snabbstart

1. Se till att batteriet är fulladdat.
2. Välj ett av följande alternativ:
 - Fäll upp stativet och placera enheten direkt på objektet, RUBY startar automatiskt.
 - Vrid kameran så den tittar snett framför enheten vi arbetar med föremål, eller vrid upp kameran för avståndsarbete, eller mot dig själv.
 - Tryck på Grön/Gula knappen för att starta och håll enheten framför dig som en kikare.
3. Justera förstoringen med Gula + och - knapparna.
4. Välj önskat färgläge med Blå Pilarna.
5. Fånga bilden med Röda frysknappen, för att kunna studera bilden. Använd den runda panoreringsknappen för att kunna studera bilden. Tryck igen för att släppa bilden.

Säkerhet och underhåll

1. **På /Av** (Grön/Gul)
2. **Färgvals knapp Upp** (Blå)
3. **Färgvals knapp Ner** (Blå)
4. **LCD Skärm.**
5. **Vridbar kamera.**
6. **Frys knapp** (Röd)
7. **Förstoring Öka** (Gul)
8. **Panoreringsknapp** (Svart)
9. **Förstoring Minska** (Gul)
10. **HDMI anslutning** (Extern bildskärm).
11. **USB Anslutning** (micro-USB till PC)
12. **Batteri indikator laddning.**
13. **Anslutning laddare.**

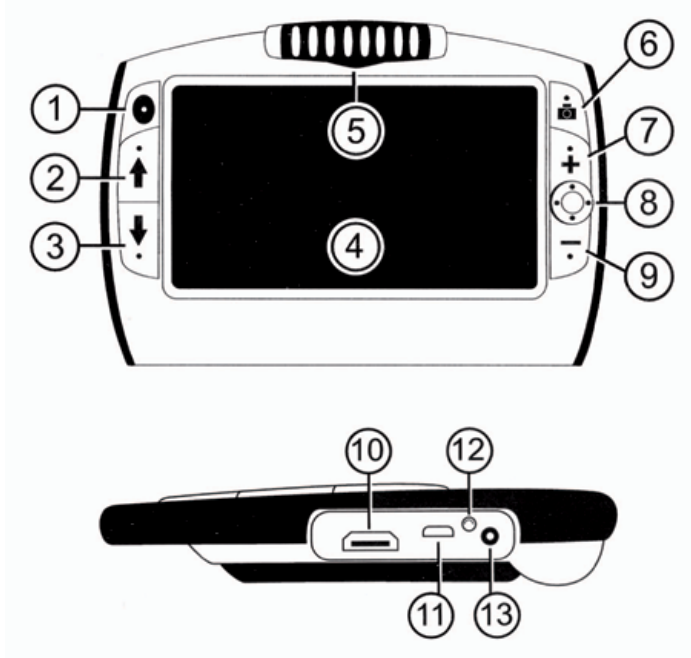



Telefon: 010-455 04 00, **E-post:** info@insyn.se

www.insyn.se